

Clearblue®

Graviditetstest

Digital Ultratidlig



Til selvtesting. Les dette pakningsvedlegget nøye før testing



Test fra
6 dager
før

uteblitt menstruasjon¹



Hvis du tester
tidlig, skal du
bruke dagens
første urin.

Ellers kan du teste når som helst



Ikke drikk
mye væske
før du tar testen.



Hold aldri
testpinnen med
spissen pekende
oppover

1 Ta testen

Ta testpinnen ut av folien, ta av hetten og bruk den med en gang. **Enten** test i:



urinstrømmen
din

eller



dypp
til her

en samlet
urinprøve




Fjern oppsugingsspiissen fra urinen når stopplyset BEGYNNER å blinke.

Dette tar vanligvis omtrent 5 sekunder. Lyset vil fortsette å blinke kort og slås deretter av. Hold oppsugingsspiissen pekende nedover, sett på hetten og legg testpinnen flatt.

2 Vent

Smart nedtelling vil vises på skjermen, og hvert segment vil vises i rekkefølge for å vise at testen pågår.

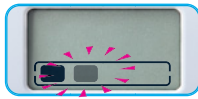

Hvis Smart nedtelling ikke vises, se "Testfeil".

3 Les av resultatet ditt

Smart nedtelling avsluttes om 1-5 minutter, og resultatet ditt vises på skjermen.

Gravid



Du kan være over 99 % sikker på at du er gravid, uansett når du tester.

Se Sp. 1 for mer informasjon.

Ikke gravid



Hvis du testet tidlig, er det fortsatt en sjanse for at du kan være gravid, siden mengden hormon øker raskt i tidlig graviditet.

Se Sp. 2 for mer informasjon.

? Spørsmål og svar

1 Resultatet mitt er Gravid. Hva skal jeg gjøre?

Kontakt legen din som kan gi deg råd om hvilke skritt du skal ta videre. Det er mulig å få et positivt resultat og finne ut senere at du ikke lenger er gravid, se Sp. 6.

Et Gravid-resultat blir værende på skjermen i opptil 1 måned.

2 Resultatet mitt er ikke gravid. Hva betyr dette?

Du er kanskje ikke gravid, eller nivået av graviditetshormon er kanskje ikke høyt nok til å oppdages ennå.

Test igjen om tre dager. Hvis også dette testresultatet er ikke gravid og mensn er sen, bør du oppsøke lege.

3 Hvor tidlig kan jeg teste?

Denne testen kan brukes fra 6 dager før uteblitt menstruasjon (5 dager før forventet menstruasjon).

Hvis resultatet ditt er Gravid, kan du være over 99 % sikker på at du er gravid, uansett når du tester.

Men siden hormonnivået varierer fra kvinne til kvinne, kan man være veldig lavt tidlig i svangerskapet, kan du være gravid, men likevel få et negativt resultat.

Diagrammet nedenfor viser prosentandelen graviditeter som ble oppdaget i urinprøver av tidlig graviditet i laboratorietesting:

Dager før uteblitt menstruasjon	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Graviditet oppdaget	> 99 %	> 99 %	> 99 %	99 %	93 %	78 %

4 Hvordan fungerer Clearblue?

Testen påviser graviditetshormonet hCG (humant koriongonadotropin) i urinen. Testfølsomhet er 10 mIU/ml. Den er over 99 % nøyaktig i laboratorietester fra dato for forventet menstruasjon.

5 Kan eventuelle legemidler eller medisinske tilstander påvirke resultatet?

Les alltid produsentens instruksjoner for ethvert legemiddel du tar før du tar en test.

Medisiner som inneholder hCG, og visse sjeldne medisinske tilstander, kan føre til falske positive resultater. Svangerskap utenfor livmoren og dersom du nylig har vært gravid, selv om ikke hele svangerskapet ble fullført, kan føre til misvisende resultater.

Hvis du er i eller nærmer deg overgangsalderen, kan du få et falskt gravid-resultat selv om du ikke er gravid.

Testen må **IKKE** være påvirket av hormonterapi som inneholder klomifensitrat, smertestillende tabletter, alkohol, antibiotika eller p-piller. Hvis resultatet ikke er som forventet, bør du rådføre deg med legen din.

6 Jeg har tidligere fått resultatet Gravid på testen, men testet igjen og fikk ikke gravid-resultat eller menstruasjon startet. Hva betyr dette?

Det er mulig å få et positivt resultat og finne ut senere at du ikke lenger er gravid. Dette kalles "tidlig graviditetstap", som dessverre ikke er uvanlig, og påvirker rundt 1 av 4 graviditeter. Heldigvis kan de fleste kvinner ha en sunn graviditet etterpå.

Slik kaster du testen

Ta ut batteriene før testpinnen kastes. Kassering av batterier skal skje i samsvar med gjeldende returordning. Ta ut batteriene ved å sette dem **buede kanten på hetten** inn på siden av testpinnen og vri for å bryte opp pinnen.

Forsiktig: Ikke ta fra hverandre, lad opp igjen eller kast batteriene i ild. Kast resten av testpinnen i henhold til gjeldende returordning for elektrisk utstyr. Ikke kast elektrisk utstyr i ild.

! Testfeil



Feil i bok

En feil har oppstått under testen. Det kan hende at:

- oppsugingspissens spiss ikke ble holdt pekende nedover
- testen ikke ble lagt flatt etter at urinen ble påført
- for mye eller for lite urin ble påført spissen

Test igjen med hjelp av en ny test, og følg instruksjonene nøye.



Tom feil

Hvis Smart nedtelling ikke vises etter testing eller begynte å kjøre og skjermen ble tom, må du utføre en ny test. Test igjen med hjelp av en ny test, og følg instruksjonene nøye.

www.clearblue.com

Produktrådgivningen er åpen mandag til fredag kl. 9.00-12.00 unntatt helligdager. Samtalen din vil bli besvart på engelsk og om nødvendig bli håndtert via en oversetter.

800 10 218

Samtaler er gratis fra fasttelefon, kan koste fra mobiltelefon. Alle samtaler spilles inn og kan overvåkes i forbindelse med kvalitetssikring. Ha produktet og emballasjen, inkludert eventuelle folieposer, hos deg når du ringer.

Instruksjoner for Clearblue Digital Ultra Early, med 'CB15' trykt på innpakningen. Til selvtesting hjemme. Kun til in vitro-diagnostisering. Ikke til innvortes bruk. Må ikke brukes om igjen. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares mellom 2 °C og 30 °C. La nå romtemperatur i 30 minutter før testing hvis oppbevart kjølig. Ikke bruk hvis foliepakningen er skadet. Må ikke brukes etter holdbarhetsdato. Inneholder små deler. Ikke spis noen deler av denne enheten. Ved svelging ved et uhell, kontakt lege. Rapporter eventuelle skader forårsaket av bruken av dette produktet til Clearblue.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Sveits.

Clearblue er et varemerke for SPD.

© 2021 SPD. Med enerrett.

78 % av gravid-resultater kan oppdages 6 dager før uteblitt menstruasjon (5 dager før forventet menstruasjon).

Denne digitale IVD-enheten oppfyller kravene for utslipp og immunitet i EN 61326-2-6:2006. Elektroniske mottiltak benyttet i det elektroniske instrumentet vil gi rimelig beskyttelse mot effekter fra elektromagnetiske forstyrrelser som det er sannsynlig at er til stede i et hjemmemiljø. Følgende forebyggende advarsler gjelder for utstyr i samsvar med EN 61326-2-6:2006.

a) Bruk av dette instrumentet i tørre omgivelser, spesielt hvis syntetiske materialer er til stede (syntetiske klær, tepper osv.), kan forårsake skadende utladning av statisk elektrisitet som kan føre til feilaktige resultater.

b) Ikke bruk dette instrumentet i nærheten av kilder med sterk elektromagnetisk stråling (f.eks. mobiltelefoner), da disse kan forstyrre riktig drift.

	Produsent		Må ikke brukes om igjen
	Medisinsk enhet til in vitro-diagnostisering		Bruk før dato
	Temperaturrense 2-30° Celsius		Partikode

