


## Rask Deteksjon Graviditetstest

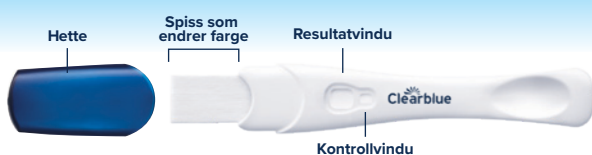

For selvtesting. Les dette pakningsvedlegget nøye før testing.

Dette produktet er en ikke-automatisert selvtestenhet til hjemmebruk, for kvalitativ deteksjon av humant koriongonadotropin (hCG) i urin for å fastslå om en kvinne er gravid. Beregnet å brukes fra fire dager før ventet menstruasjon.

### Advarsler og forholdsregler

Instruksjoner for enheten, med «CB11012» trykt på pakningen. Til selvtesting hjemme. Kun til in vitro-diagnostisering. Ikke til innvortes bruk. Må ikke brukes om igjen. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares mellom 2 og 30 °C. La testen ligge i romtemperatur i 30 minutter før du tester, dersom den oppbevares i kjøleskap. Må ikke brukes dersom foliepakningen er skadet. Når folien er åpnet, må du bruke den umiddelbart. Må ikke brukes etter holdbarhetsdato. Kast sammen med vanlig husholdningsavfall. Inneholder små deler. Ikke spis noen deler av denne enheten. Kontakt lege dersom svelging skjer ved et uhell. Rapporter eventuelle skader forårsaket av bruken av dette produktet til Clearblue og kompetente myndigheter i medlemslandet.

Over 99 % nøyaktig  
fra dagen du forventer  
menstruasjonen



Resultater  
som er  
enkle å  
lese av



Ikke drikk  
mye væske  
før du tester


Les resultatet  
innen  
10 minutter



## 1 Ta testen

Materieler som kreves, men som ikke er inkludert: En ren, tørr beholder og en stoppeklokke. Fjern foliepakningen, ta av hetten og bruk testen med én gang.

Plasser fargeendringsspissen i **5 sekunder**:

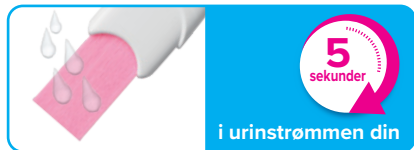

eller



**VIKTIG:** fargeendringsspissen vil umiddelbart bli rosa, noe som viser at den absorberer urin, **men du MÅ fortsette å holde spissen i urinen i hele 5 sekunder.**

Sett på hetten, og legg testpinnen flatt ned. Hvis spissen ikke blir helt rosa, se «Testfeil».

**VIKTIG:** senk spissen helt som vist

## 2 Vent



- Et Gravid «+»-resultat kan vises etter 1 minutt når du tester fra den dagen menstruasjonen uteble (som er dagen etter du forventet menstruasjon).
- Vent i tre minutter for å bekrefte et Ikke Gravid «-»-resultat. Hvis det ikke vises noen blå linjer, se «Testfeil».

## 3 Resultater

**Gravid – kontakt legen din hvis resultatet ditt er at du er gravid**  
(se spørsmål 1)

Bilde A



Resultatvindu

Bilde B



Kontrollvindu

Bilde C



**Ikke Gravid**  
(se spørsmål 2)



Hvis du er usikker på resultatet, se spørsmål 6.

En blå linje må være til stede i kontrollvinduet for at resultatet ditt skal være gyldig. Hvis ikke, se «Testfeil».

**VIKTIG!** Les resultatet ditt senest innen **10 minutter** etter at du har tatt testen. Se bort fra alle endringer etter denne tiden har passert.

## Spørsmål og svar

- 1 Resultatet mitt er Gravid. Hva skal jeg gjøre?** Du bør snakke med legen din som kan gi deg råd om hva som er neste steg. Det er mulig å få et positivt resultat og finne ut senere at du ikke lenger er gravid (se spørsmål 7).
- 2 Resultatet mitt er Ikke Gravid. Hva betyr dette?** Det kan hende at du ikke er gravid, eller at nivået av graviditetshormon ikke er høyt nok til å registreres ennå. Test igjen om tre dager. Hvis testen viser resultatet Ikke Gravid og menstruasjonen din er sen, må du oppsøke lege.
- 3 Jeg er ikke sikker på når jeg forventer min neste menstruasjon. Hvordan vet jeg at jeg utfører testen til riktig tid?** For å finne ut når du forventer å få menstruasjon, kan du beregne hvor lang syklusen din vanligvis er ved å telle antall dager fra den første dagen av menstruasjon til dagen før neste menstruasjon starter. Hvis du har uregelmessige sykluser, bør du beregne på grunnlag av den lengste syklusen du har hatt de siste månedene før du tester.
- 4 Hvordan fungerer Clearblue?** Den oppdager hCG i urin når du bruker prøven. Visuelle resultater indikerer om hCG har blitt oppdaget med over 99 % nøyaktighet fra den dagen du forventer menstruasjonen.
- 5 Kan eventuelle legemidler eller medisinske tilstander påvirke resultatet?** Les alltid produsentens instruksjoner for alle legemidler du tar før du tar testen. Medisiner som inneholder hCG, og visse sjeldne medisinske tilstander, kan føre til falske positive resultater. Svangerskap utenfor livmoren og nylige graviditeter, selv om ikke hele svangerskapet ble fullført, kan føre til misvisende resultater. Hvis du er i, eller nærmer deg overgangsalderen, kan testresultatet feilaktig bli «Gravid», selv om du ikke er gravid. Testen skal **IKKE** bli påvirket av hormonterapi som inneholder klomifensitrat, smertestillende tabletter, alkohol, antibiotika eller p-piller. Dersom resultatet ikke er som forventet, bør du rådføre deg med legen din.

- 6 Hva om jeg er usikker på resultatet mitt?** For at resultatet ditt skal være «Gravid» må det være en blå strek i kontrollvinduet og et «+»-symbol i resultatvinduet innen 10 minutter etter at testen ble utført.

### Gravid-resultater

**Bilde A:** Det er mer sannsynlig at dette skjer når du er gravid og du tester mer enn noen dager etter uteblitt menstruasjon, da hCG-nivåene er høyere.

**Bilde B:** Det kan hende du ser dette hvis du tester dagen du forventer menstruasjonen din, ettersom hCG-nivåene kan være relativt lave.

**Bilde C:** Dette angir fortsatt et «Gravid»-resultat.

Det spiller ingen rolle om én av strekene som utgjør symbolet «+» er lysere eller mørkere enn den andre; resultatet er «Gravid».

For at resultatet ditt skal være «Ikke Gravid» må det være en blå strek i kontrollvinduet og et «-»-symbol (minus) i resultatvinduet innen 10 minutter etter at testen ble utført. Hvis du fortsatt er usikker på resultatet ditt, skal du vente i minst 3 dager før du tester igjen, og følge instruksjonene nøye.

- 7 Jeg har tidligere fått «Gravid»-resultat på testen, men testet igjen og fikk negativt resultat eller menstruasjonen startet. Hva betyr dette?** Det er mulig å få et positivt resultat og senere finne ut at du ikke lenger er gravid. Dette kan være på grunn av tidlig graviditetstap. Det er dessverre ikke uvanlig, og det påvirker rundt 1 av 4 graviditeter. De fleste kvinner kan ha en sunn graviditet etterpå.
- 8 Er det noe jeg bør gjøre hvis jeg planlegger å bli gravid?** Du bør snakke med legen din før du prøver å bli gravid. Mange leger anbefaler at det kan være gunstig å ta folsyre eller vitamintilskudd under svangerskapet, unngå alkohol, slutte å røyke og å prøve å opprettholde en sunn vekt. Det kan også være lurt å vurdere å bruke en egglosningstest for å identifisere de mest fruktbare dagene. Clearblue tilbyr et utvalg av produkter som er laget for å maksimere sjansene dine for å bli gravid.

## Testfeil

### Fargeendringsspissen har ikke blitt helt rosa.

Du har kanskje ikke påført nok urin. Du kan imidlertid være sikker på at testen har fungert hvis kontrollinjen vises innen 10 minutter etter testing.

### Ingen blå linje vises i kontrollvinduet innen 10 minutter etter testing.

Testen har ikke virket, muligens fordi det ble påført for mye eller for lite urin. Test igjen med en ny test, og følg instruksjonene nøye.

Resultatvindu  
Kontrollvindu



## www.clearblue.com

Produktrådgivningen er åpen mandag til fredag kl. 9.00-12.00 unntatt helligdager. Samtalen din vil bli besvart på engelsk og om nødvendig bli håndtert via en oversetter.

**800 10 218** Samtaler er gratis fra fasttelefon, kan koste fra mobiltelefon. Alle samtaler spilles inn og kan overvåkes i forbindelse med kvalitetskontroll. Ha produktet og emballasjen, inkludert eventuelle folieposer, med deg når du ringer.

### Ytelseegenskaper

#### Klinisk ytelse:

Klinisk ytelsestesting viste at enheten er > 99 % nøyaktig når det gjelder å fastslå graviditetsstatus fra dagen for forventet menstruasjon.

- Enheten var > 99 % nøyaktig for vanlige brukerne sammenlignet med deres graviditetsstatus (testet av 120 kvinner).
- I en studie som testet 600 prøver, var enheten > 99 % nøyaktig fra dagen for forventet menstruasjon.
- Klinisk spesifisitetstesting med pre-, peri- og postmenopausale prøver (600 prøver) bekreftet ≥ 99 % spesifisitet.

### Analytisk ytelse:

Analytisk spesifisitet ble etablert ved å teste enheten med potensielt forstyrrende eller kryssreagerende stoffer. Resultatene bekreftet at høye konsentrasjoner av det samme ikke påvirker enhetens ytelse. Den blir heller ikke påvirket ved høye nivåer av beta-kjerne hCG-fragmenter, svært høye nivåer av intakt hCG, en rekke spesifikke vekter eller pH i urin. En presisjonsstudie viste at den analytiske sensitiviteten til enheten er 25 mIU/ml.

### Litteratur

1. Perrier d'Hauterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Gnoth C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.

<b>IVD</b>	In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr	<b>LOT</b>	Partikode
	Produsent		Siste forbruksdag
	Må ikke brukes om igjen		Temperaturgrense 2°C – 30°C
<b>EC REP</b>	Autorisert representant i Det europeiske fellesskap		