


Ultratidlig Graviditetstest

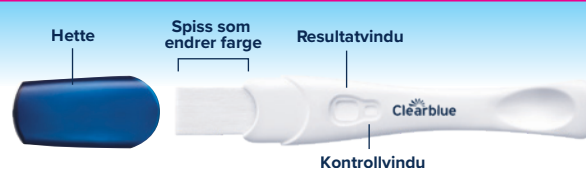

For selvtesting. Les dette pakningsvedlegget nøye før testing.

Advarsler og forholdsregler

Instruksjoner for enheten, med «CB14005» trykt på pakningen. Til selvtesting hjemme. Kun til in vitro-diagnostisering. Ikke til innvortes bruk. Må ikke brukes om igjen. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares mellom 2 og 30 °C. La testen ligge i romtemperatur i 30 minutter før du tester, dersom den oppbevares i kjøleskap. Må ikke brukes dersom foliepakningen er skadet. Må ikke brukes etter holdbarhetsdato. Når folien er åpnet, må du bruke den umiddelbart. Kast sammen med vanlig husholdningsavfall. Inneholder små deler. Ikke spis noen deler av denne enheten. Kontakt lege dersom svelging skjer ved et uhell. Rapporter eventuelle skader forårsaket av bruken av dette produktet til Clearblue og kompetente myndigheter i medlemslandet.



Test fra
6 dager
før
uteblitt menstruasjon*

Hvis du tester tidlig, skal du bruke dagens første urin
Ellers kan du teste når som helst



Ikke drikk mye væske før du tester

Les resultatet innen 10 minutter



1 Ta testen

Materialer som kreves, men som ikke er inkludert: En ren, tørr beholder og en stoppeklokke. Ta testen ut av folien, ta av hetten og bruk testen med en gang.



i urinstrømmen din

5 sekunder

eller



i en innsamlet urinprøve

20 sekunder

VIKTIG: senk spissen helt som vist

Plasser spissen som endrer farge:

VIKTIG: Spissen som endrer farge, blir umiddelbart rosa for å vise at urinen blir absorbert. Start tidtakingen så snart du ser at spissen som endrer farge, blir rosa. Sett på hetten, og legg testpinnen flatt ned. Hvis spissen ikke blir helt rosa, se «Testfeil».

2 Vent



En linje i kontrollvinduene kan raskt begynne å vises, men du må **VENTE 3 HELE MINUTTER** før du leser resultatet.

Hvis det ikke vises noen blå linjer, se «Testfeil».

3 Resultater

Gravid – kontakt legen din hvis resultatet ditt er at du er gravid (se spørsmål 1)

Bilde A



Resultatvindu Kontrollvindu

Bilde B



Bilde C



Ikke Gravid (se spørsmål 2)



Hvis du er usikker på resultatet, se spørsmål 6.

HVIS DU SER TO STREKER, ER DU GRAVID. DET SPILLER INGEN ROLLE HVOR SVAKE ELLER MØRKE STREKENE ER.

En blå linje må være til stede i kontrollvinduene for at resultatet ditt skal være gyldig. Hvis ikke, se «Testfeil».

VIKTIG! Les resultatet ditt senest innen **10 minutter** etter at du har tatt testen. Se bort fra alle endringer etter denne tiden har passert.

? Spørsmål og svar

- 1 Resultatet mitt er Gravid. Hva skal jeg gjøre?** Du bør snakke med legen din som kan gi deg råd om hva som er neste steg. Det er mulig å få et positivt resultat og finne ut senere at du ikke lenger er gravid, se spørsmål 7.
 - 2 Resultatet mitt er Ikke Gravid. Hva betyr dette?** Det kan hende at du ikke er gravid, eller nivået av graviditetshormon er for lavt til å registreres. Test igjen om tre dager. Hvis testen viser resultatet Ikke Gravid og menstruasjonen din er sen, må du oppsøke lege.
 - 3 Hvor tidlig kan jeg teste?** Denne testen kan brukes fra 6 dager før den uteblitte menstruasjonen din (5 dager før du forventer menstruasjonen).* Men siden hormonnivået varierer fra kvinne til kvinne, og kan være veldig lavt tidlig i svangerskapet, kan du være gravid, men likevel få et negativt resultat. Diagrammet nedenfor viser prosentandelen graviditeter som ble oppdaget i laboratorietester med urinprøver i tidlig graviditet:
- | Dager før uteblitt menstruasjon | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Graviditet oppdaget | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | 96% | 79% |
- 4 Hvordan fungerer testen?** Den oppdager hCG i urin når du bruker prøven. Visuelle resultater indikerer om hCG har blitt oppdaget med over 99 % nøyaktighet fra den dagen du forventer menstruasjonen.
 - 5 Kan eventuelle legemidler eller medisinske tilstander påvirke resultatet?** Les alltid produsentens instruksjoner for alle legemidler du tar før du tar testen. Medisiner som inneholder hCG, og visse sjeldne medisinske tilstander, kan føre til falske positive resultater. Svangerskap utenfor livmoren og nylige graviditeter, selv om ikke hele svangerskapet ble fullført, kan føre til misvisende resultater. Hvis du er i, eller nærmer deg overgangsalderen, kan testresultatet feilaktig bli «Gravid», selv om du ikke er gravid.

- Testen skal **IKKE** bli påvirket av hormonterapi som inneholder klomifenstrat, smertestillende tabletter, alkohol, antibiotika eller p-piller. Dersom resultatet ikke er som forventet, bør du rådføre deg med legen din.
- 6 Hva om jeg er usikker på resultatet mitt?** Hvis du ser to blå linjer innen 10 minutter etter testing, er du gravid. Det spiller ingen rolle hvor svake eller mørke linjene er.

Gravid-resultater

- Bilde A:** Det er mer sannsynlig at dette skjer hvis du tester før du forventer menstruasjonen din, når hCG-nivåene kan være relativt lave.
- Bilde B:** Det kan hende du ser dette hvis du tester dagen du forventer menstruasjonen din, ettersom hCG-nivåene kan være relativt lave.
- Bilde C:** Det kan hende du ser dette hvis du tester mer enn noen få dager etter uteblitt menstruasjon, ettersom hCG-nivåene er høyere.
- Hvis du fortsatt er usikker på resultatet ditt, skal du vente i minst 3 dager før du tester igjen, og følge instruksjonene nøye.
- 7 Jeg har tidligere fått «Gravid»-resultat på testen, men testet igjen og fikk negativt resultat eller menstruasjonen startet. Hva betyr dette?** Det er mulig å få et positivt resultat og senere finne ut at du ikke lenger er gravid. Dette kan være på grunn av tidlig graviditetstap. Det er dessverre ikke uvanlig, og det påvirker rundt 1 av 4 graviditeter. De fleste kvinner kan ha en sunn graviditet etterpå.
 - 8 Er det noe jeg bør gjøre hvis jeg planlegger å bli gravid?** Du bør snakke med legen din før du prøver å bli gravid. Mange leger anbefaler at det kan være gunstig å ta folsyre eller vitamintilskudd under svangerskapet, unngå alkohol, slutte å røyke og å prøve å opprettholde en sunn vekt. Det kan også være lurt å vurdere å bruke en egglosningstest for å identifisere de mest fruktbare dagene. Clearblue tilbyr et utvalg av produkter som er laget for å maksimere sjansene dine for å bli gravid.

! Testfeil

Spissen som endrer farge, blir ikke helt rosa. Du har kanskje ikke påført nok urin. Du kan imidlertid være sikker på at testen har fungert hvis kontrollinjen vises innen 10 minutter etter testing.

Ingen blå linje vises i kontrollvinduene innen 10 minutter etter testing. Testen har ikke virket, muligens fordi det ble påført for mye eller for lite urin. Test igjen med en ny test, og følg instruksjonene nøye.

Resultatvindu
Kontrollvindu



Ytelseegenskaper

Klinisk ytelse:

Klinisk ytelsestesting viste at enheten er > 99 % nøyaktig når det gjelder å fastslå graviditetsstatus fra dagen for forventet menstruasjon.

- Enheten var > 99 % nøyaktig for vanlige brukerne sammenlignet med deres graviditetsstatus (testet av 911 kvinner).
- I en studie som testet 300 prøver, var enheten > 99 % nøyaktig fra dagen for forventet menstruasjon.
- Klinisk spesifisitetstesting med pre-, peri- og postmenopausale prøver (1051 prøver) bekreftet > 99 % spesifisitet.

Analytisk ytelse:

Analytisk spesifisitet ble etablert ved å teste enheten med potensielt forstyrrende eller kryssreagerende stoffer. Resultatene bekreftet at høye konsentrasjoner av det samme ikke påvirker enhetens ytelse. Den blir heller ikke påvirket ved høye nivåer av beta-kjerne hCG-fragmenter, svært høye nivåer av intakt hCG, en rekke spesifikke vekter eller pH i urin. En presisjonsstudie viste at den analytiske sensitiviteten til enheten er 10 mIU/ml.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Sveits.

IVD	In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr	LOT	Partikode
	Produsent		Siste forbruksdag
	Må ikke brukes om igjen		Temperaturgrense 2 °C–30 °C
EC REP	Autorisert representant i De europeiske fellesskap		

Litteratur

1. Perrier d'Hauterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Gnoth C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.

*79 % av Gravid-resultater kan oppdages 6 dager før uteblitt menstruasjon (5 dager før du forventer menstruasjonen).

www.clearblue.com

Produktrådgivningen er åpen mandag til fredag kl. 9.00-12.00 unntatt helligdager. Samtalen din vil bli besvart på engelsk og om nødvendig bli håndtert via en oversetter.

800 10 218 Samtaler er gratis fra fasttelefon, kan koste fra mobiltelefon. Alle samtaler spilles inn og kan overvåkes i forbindelse med kvalitetssikring. Ha produktet og emballasjen, inkludert eventuelle folieposer, med deg når du ringer.

Clearblue® er et varemerke for SPD.
© 2025 SPD. Med enerett.

2300762.00 12-2025



0123